

Allegato III al PROTOCOLLO
“Gestione emergenza Covid_19 negli ambienti di lavoro ENIT”

INDICAZIONI PER USARE CORRETTAMENTE LE
MASCHERINE

CORRETTO UTILIZZO MASCHERINE

Come indossarle

La mascherina, se non indossata correttamente, può essere a sua volta veicolo di trasmissione inconsapevole del contagio.

1. Lavarsi le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione idroalcolica prima di indossare o toccare la mascherina.
2. Appoggiare sul palmo della mano la mascherina e agganciare gli elastici dietro le orecchie (tenere il nasello rivolto verso l'alto)
3. Aggiustare il nasello con entrambe le mani affinché aderisca perfettamente al naso.
4. Verificare con uno specchio che la mascherina aderisca perfettamente su tutto il volto.

IMPORTANTE

- Una volta giunti nel luogo di lavoro occorre immediatamente smaltire i dpi personali e utilizzare UNICAMENTE quelli messi a disposizione dall'azienda.
- E' fondamentale che i capelli siano raccolti e non davanti al viso.
- Non indossare gioielli che interferiscano con il bordo di tenuta dei DPI.

Solo in casi strettamente necessario, per rimuovere la mascherina per bere o mangiare fatelo in base alle seguenti indicazioni:

1. Igienizzare le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione idroalcolica.
2. Rimuovere gli elastici.
3. Allontanare la mascherina, facendo sempre attenzione a **non toccare la parte anteriore.**
4. Riporre la mascherina in una bustina sterile o in un contenitore pulito avendo cura che la parte interna della mascherina non venga contaminata.
5. Procedere nuovamente con l'igiene delle mani.

Si sconsiglia fortemente di effettuare questa manovra per altri scopi, in particolare per fumare.

Come rimuovere la mascherina

Nella fase di rimozione è importante non toccare la parte anteriore della mascherina che potrebbe essere contaminata.

1. Rimuovere gli elastici
2. Allontanare la mascherina dal volto, facendo sempre attenzione a non toccare la parte anteriore.
3. Gettare la mascherina all'interno di un contenitore chiuso, come un sacchetto di plastica.
4. Igienizzare le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione idroalcolica .

Come indossare correttamente i dispositivi FFP2 - FFP3



1 Lavare accuratamente le mani.



2 Appoggiare sul palmo della mano la mascherina e far passare i lacci sul dorso della mano (tenere il nasello rivolto verso l'alto)



3 Portare la mascherina sul volto, la base sul mento e il nasello sopra il naso, in modo da coprirlo.



4 Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico superiore e farlo passare dietro la testa sopra le orecchie.



5 Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico inferiore e farlo passare dietro la testa sotto le orecchie nella parte superiore del collo.



6 Con entrambe le mani, aggiustare il nasello affinché aderisca perfettamente al naso.



7 Provare ad inspirare e verificare che la mascherina aderisca perfettamente (l'aria dovrebbe entrare solo attraverso il filtro).



8 Eventualmente con uno specchio, verificare che la mascherina aderisca perfettamente su tutto il volto.